

### NACH EINEM STICH ODER BISS

Ein Insektenstich oder -biss kann Schmerzen, Schwellungen, Rötungen, Hautirritationen und Juckreiz verursachen. Manchmal kann ein Insektenstich, zum Beispiel von einer Biene- oder Wespe, eine starke allergische Reaktion hervorrufen. Es ist wichtig, dass Sie nach einem Insektenstich oder Zeckenbiss die richtige Behandlung erhalten.

### NACH EINEM STICH ODER BISS

### Tick-Out Tick-Remover

Nach einem Aufenthalt im Freien sollten Sie prüfen, ob Sie von Zecken befallen wurden. Falls Sie eine Zecke entdecken, muss diese innerhalb von 8 Stunden entfernt werden. Benutzen Sie zum sicheren und einfachen Entfernen der Zecke den Care Plus® Tick Remover. Die Verpackung enthält auch zwei Alkoholtücher, um die Einstichstelle zu desinfizieren, nachdem die Zecke entfernt wurde.



#### Gebrauchsanweisung

1. Zum Öffnen des Greifers halten Sie die Zeckenzange zwischen Daumen und Mittelfinger fest und drücken mit dem Zeigefinger auf den hinteren Teil der Zange.
2. Setzen Sie den Greifer vorsichtig über die Zecke und so dicht wie möglich gegen die Haut an, und schließen Sie den Greifer dann.
3. Drehen Sie die festgeklemmte Zecke mit einer kleinen Drehung nach links und nach rechts, sodass sich die Zecke teilweise löst. Ziehen Sie dann die Zecke mit einigen vorsichtigen Rucks senkrecht aus der Haut. Desinfizieren Sie den Zeckenbiss und notieren Sie das Datum des Zeckenbisses in Ihrem Kalender.
4. Wenn die Zecke acht Stunden in Ihrer Haut gesessen hat, sollten Sie den Care Plus®- Zeckentest durchführen, um festzustellen, ob die Zecke mit der Borrelia-Burgdorferi-Bakterie infiziert war.

#### VORTEILE

- Entfernt Zecken schnell, sicher und einfach
- Speziell entwickelter Greifkopf (auch für Nymphen)
- Minimales Risiko, die Zecke zu beschädigen
- Enthält zwei Alkohol-Tücher zum Desinfizieren der Bissstelle, nachdem die Zecke entfernt wurde

#### PRODUKTDATEN

Artikel-Nummer  
38395  
EAN-Code  
8714024383958  
Gewicht in Gramm  
25 gr  
Verpackungsmaße L x B x H  
30 x 80 x 135 mm  
Bestellumfang (Artikel)  
6